



# out now! TAN ÚNICO COMO TÚ

[www.mysize-condoms.com](http://www.mysize-condoms.com)

## Probablemente, más de lo que esperabas.

Todo lo que este preservativo puede darte:

fácil de abrir, un aroma agradable, nueve tamaños de ancho, extra fino, látex **vytex** con pobre contenido alergénico, vegano, producido de una manera respetuosa y justa con el medio ambiente. Máxima sensibilidad y seguridad.

El preservativo que sientes que no llevas, precisamente porque lo llevas puesto.



**ACLARACIÓN:** Para una primera recomendación de anchura **MY.SIZE IPRO**, la información relevante es la circunferencia del pene, no el largo.

**IMPORTANTE:** Según tus propios gustos y preferencias, ve probando con los diferentes tamaños de ancho. Lo más importante es que el preservativo no se salga ni quede demasiado apretado.



### INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al imprimir, seleccione „ninguno” en el ajuste de página. Solo de esta forma la cinta métrica se imprimirá en una escala fiable. Lo más recomendable es descargar el archivo e imprimirlo con Adobe – Acrobat sin ajuste de página.

Reparte tu suerte con **MY.SIZE IPRO**: desprende la tira superior para un amigo.

## Paso a paso. Funciona así de fácil.

**01.** Recorta la cinta métrica **MY.SIZE IPRO** siguiendo la línea de puntos.




**02.** Coloca con cuidado la cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pene erecto. El ancho recomendado quedará a la altura de la flecha impresa en la cinta.

ATENCIÓN: Al recortar la cinta métrica podrían quedar bordes de papel afilados!



**03.** El resultado es una primera recomendación. Ahora ve probando con los diferentes tamaños en torno a esa anchura. Tu decisión dependerá de cómo te sientes y de tus propias preferencias.

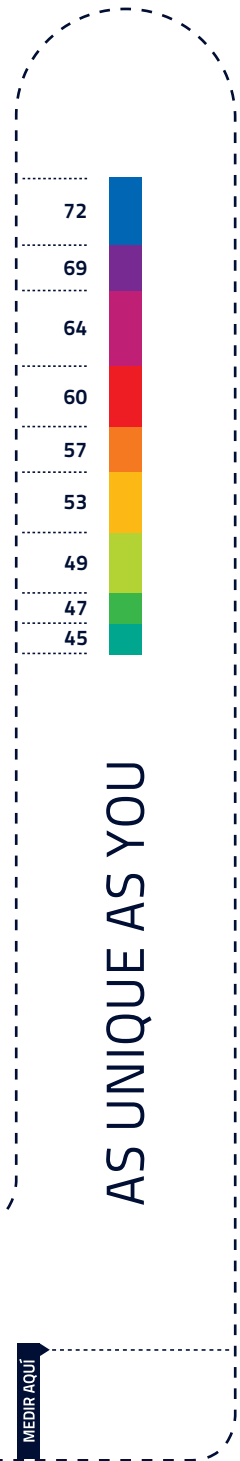

MEDIR AQUÍ